

Prontosan[®] Wound Gel



PRONTOSAN® GEL

1.- COMPOSICIÓN – DATOS TÉCNICOS:

Hidrogel para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas:

- 0.1 % Undecilenamidopropil betaina.
- 0.1 % Polihexanida
- Glicerol
- Agua Purificada
- Hidroxietilcelulosa



- **Aspecto y olor:** Hidrogel no graso claro, incoloro y prácticamente inodoro.

- **Conservación y periodo de utilización:** 8 Semanas una vez abierta la botella.

- **Envase cerrado estéril.**

2.- INDICACIONES:

Prontosan® Gel para el lavado de heridas, posee una excelente capacidad de limpieza y descontaminación de la superficie tisular incluso en superficies de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas profundas.

La aplicación de Prontosan® Gel no produce dolor y es bien tolerada por los alérgicos. Los olores desagradables de la herida desaparecen rápidamente.

Prontosan® Gel para el lavado de heridas puede emplearse en los siguientes casos:

a) heridas agudas:

- heridas traumáticas tales como laceraciones de la piel, abrasiones o heridas punzantes (en las que está indicada la sutura, Prontosan®-Wound Gel debe aplicarse tras el cierre quirúrgico).

- heridas post-operatorias.

b) heridas crónicas: (esencialmente heridas cavitadas y de difícil acceso) incluyendo, úlceras arteriales y venosas, úlceras en pacientes diabéticos y úlceras por decúbito.

c) heridas térmicas (quemaduras de 1er y 2º grado, congelación)

d) heridas químicas e inducidas por radiación

e) puertos de entrada de catéteres venosos centrales, catéteres urológicos, tubos de PEG/PEJ y estomas.

Para la humidificación de vendajes y apósitos de heridas tales como compresas, gasas, almohadillas, esponjas, geles, hidrofibras, alginatos, hidrocoloides etc.

Durante el cambio de los apósitos para disolver vendajes u otros apósitos incrustados.

La aplicación de Prontosan®-Wound Gel es indolora y bien tolerada por pacientes que padecen algún tipo de alergia. El olor desagradable que desprenden algunas heridas desaparece rápidamente.

3.- MODO DE EMPLEO:

Las heridas, en primer lugar, siempre deben irrigarse y lavarse con Prontosan® Solución (ver prospecto del producto), de modo que los depósitos de fácil disolución ya se hayan eliminado antes de aplicar Prontosan® Wound Gel.

La superficie de la herida deben cubrirse con una capa de gel de al menos 3 -5 mm de espesor. Para ello se aplicará Prontosan® Gel sobre la herida o se rellenarán las cavidades bolsillos de las heridas. También se pueden impregnar o humedecer los vendajes en espeiral, gasas, compresas y otros materiales absorbentes o de relleno, para cubrir la herida hasta el siguiente cambio. De esta forma la superficie de la herida se mantiene humedecida, permitiendo una buena limpieza. Los depósitos se disuelven suavemente y se retiran con el siguiente cambio de vendaje/apósito.

Debe utilizarse tantas veces sea necesario para que todos los depósitos y tejidos necrotizados se puedan retirar fácilmente y la herida aparezca limpia. Esta es una buena condición previa para la curación natural de la herida y permite el desbridamiento quirúrgico en condiciones óptimas de visibilidad y seguridad.

Se recomienda la limpieza extensa y de toda la parte de cuerpo adyacente a la herida, con objeto de minimizar el riesgo de diseminación de microorganismos en la herida.

4.- TOLERANCIA TISULAR Y BIOCMPATIBILIDAD

No citotóxico, no irritante, no sensibilizante, indoloro, sin efecto inhibidor de la granulación o epitelización, dermatológicamente inocuo.

5.- EFFECTOS ADVERSOS

- No se han descrito

6.- CONTRAINDICACIONES

Puesto que nunca se pueden descartar las reacciones alérgicas, no se deberá aplicar Prontosan® Gel en caso de alergias conocidas o sospecha de las mismas frente a alguno de sus componentes.

No utilizar en caso de cartílago hialino.

No utilizar en combinación de tensoactivos aniónicos, pomadas, aceites o enzimas y otros productos semejantes. Al eliminar dichas sustancias de la herida, debe comprobarse que éstas hayan sido eliminadas por completo.

7.- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Indicado únicamente para uso externo en heridas cutáneas.

No apto para infusión ni inyectar. No ingerir. Utilizar sólo los envases sin abrir y sin daños aparentes. Proteger de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

8.- PRESENTACIONES:

Prontosan® Wound Gel 30 ml

Cod. BBRAUN 400505

